

# Multi-Mam<sup>®</sup> Kompressor



LÆS HELE INDLÆGSSEDLÉN GRUNDIGT FØR DU BRUGER MULTI-MAM KOMPRESSER OG GEM DEN TIL SENERE BRUG.

## MULTI-MAM KOMPRESSER BEHANDLER ØMME BRYSTVORTER HOS AMMENDE MØDRE

- Understøtter den naturlige helingsproces
- Direkte kølende og beroligende effekt på ømme brystvorter
- Plejer huden omkring brystvorterne
- Neutraliserer skadelige mikroorganismer
- Baseret på naturlige ingredienser (ufarligt at indtage)

## INDIKATIONER

- Brystvorteproblemer forårsaget af amning
- Smertefulde, ømme og hævede brystvorter
- Vabler, betændte områder og skældende brystvorter
- Udtørrede brystvorter

## SÅDAN FUNGERER MULTI-MAM KOMPRESSER

Multi-Mam Kompressor er specielt udviklet til brystvortepleje hos ammende mødre. Multi-Mam kompressor har en direkte afkølede og beroligende virkning på ømme brystvorter, optimerer hudens tilstand og reducerer hævelse. Hver kompressor er imprægneret med gel, der indeholder det patenterede 2QR-kompleks. Denne naturlige, plantebaserede ingrediens har den unikke evne til at forhindre skadelige bakterier i at komme i kontakt med vævet.


Multi-Mam Kompressor er et naturprodukt baseret på det patenterede 2QR-kompleks. Multi-Mam Kompressor danner en blød og behagelig pude på brystvorten og skaber optimale forhold for den naturlige helingsproces. Det er ikke nødvendigt at fjerne gelen inden amning. Gelen består af naturlige vegetabiliske ingredienser og er uskadelig at sluge.

## BRUGSVEJLEDNING

Vask dine hænder. Åben posen, fold kompressen ud, og læg den gelimprægnerede side på den ømme brystvorte. Lad kompressen sidde på så længe det ønskes, men mindst i 10 minutter, helst i 30 minutter og højst i 1 time. Eventuel overskydende gel behøver ikke blive fjernet før amning, da sammensætningen er ufarligt at sluge. Påfør mindst 2 gange dagligt, indtil generne er ophørt. Kompressen er udelukkende til engangsbrug. Kompressen bortskaffes efter brug af hygiejniske årsager.

Kompressor bør ikke bruges længere end 30 på hinanden følgende dage. I tilfælde af vedvarende eller gentagende gener skal du kontakte din læge.

## Brugsvejledning

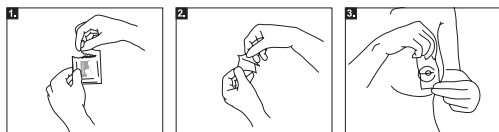

1. Åben posen
2. Fold kompressen ud
3. Læg den gelimprægnerede side på din brystvorte

## MULTI-MAM-KOMPRESSER ER BASERET PÅ NATURLIGE INGREDIENSER

Multi-Mam Kompressor er et naturprodukt baseret på det patenterede 2QR-kompleks.

## INGREDIENSER

Galactaarabinan Polyglucuronic Acid Crosspolymer\*, Glycerin (plant origin), Xanthan Gum.

\*2QR-kompleks: patenteret ingrediens udvundet af Aloe Barbadosis.

## ALLERGIINFORMATION

Allergier over for ingredienserne i Multi-Mam Kompressor er meget sjældne. Hvis du er allergisk overfor plantebaserede emner, anbefales det, at der prøves at sætte lidt gel på indersiden af underarmen. Hvis der forekommer en kløende rød plet, anbefales det ikke at bruge Multi-Mam Kompressor.

## OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn i den originale pakning ved stuetemperatur mellem 10 ° C og 25 ° C. For udløbsdato, se posen og pakken.

## BAGGRUND

### Ømme brystvorter

Amning er den mest naturlige måde at made din baby på og giver vigtig næring, nærhed og tryghed. Normalt påvirker det nyfødte barns sugen huden ved brystvorten med synlige ændringer i huden omkring brystvorten, især hævelse. Brystvorteproblemer såsom ømme, smertefulde og hævede brystvorter er almindelige under amning. Cirka 80-95% af ammende mødre oplever en vis grad af ømhed, hvor 26% rapporterer ekstreme smerter i brystvorten. At finde den rigtige amstilling er meget vigtig for at opnå brystvorte komfort under amning samtidig med effektiv sugning fra babyen. Andre faktorer er også årsag til sprækkede brystvorter, såsom produkter, der fjerner den naturlige fugt fra brystvorten (såber, shampooer) eller hvis man har tendens til at have tør hud.

### Ammestilling

En god ammeoplevelse starter med en god amstilling. Babyen er godt placeret, når hele brystvorten og det omkringliggende område med brystvorten er i babyens mund, og når brystvorten vender mod det bagerste af babyens mund, og dens tunge dækker de nederste tænder. Dette beskytter mod mulig skade af brystvorten.

**Producent:**  
BioClin BV, Blaak 555  
3011 GB Rotterdam, The Netherlands